


LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT LA NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION

A. Informations sur les verrues

Les verrues sont des excroissances inoffensives de la peau causées par le "human papilloma virus" (HPV). Il existe plusieurs types de verrues, mais les plus courantes sont les verrues dites communes et les verrues plantaires. Ce sont des excroissances bénignes formées par un noyau de tissu conjonctif et des vaisseaux sanguins, recouvertes de tissu épithélial.

Les verrues communes sont reconnaissables à leur texture rugueuse et leur aspect en "chou-fleur". Généralement, elles apparaissent sur les mains, les coudes et les genoux.

Les verrues plantaires sont similaires aux verrues communes, mais elles apparaissent uniquement sur la plante des pieds, les talons ou en dessous des orteils. En général, les verrues plantaires sont plus plates et douloureuses en raison de la pression exercée lors de la marche.

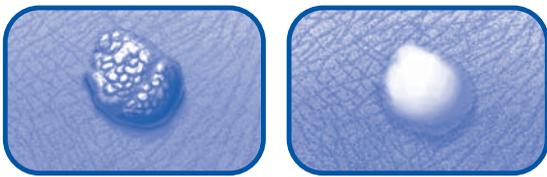

7 à 10 % de la population est confrontée aux verrues. Les verrues sont très contagieuses et surviennent davantage lorsque le système immunitaire de l'organisme est affaibli. Les verrues peuvent être transmises d'une personne à l'autre et d'un endroit du corps à l'autre par contact direct avec le site infecté. Plus de 50 % des verrues disparaissent spontanément après deux ans. Cependant, de nombreux patients préfèrent les traiter dès le début plutôt que d'attendre qu'elles disparaissent naturellement, car elles peuvent être inesthétiques, gênantes et surtout douloureuses dans le cas des verrues plantaires.

Il existe traditionnellement deux manières de traiter les verrues communes et les verrues plantaires : d'une part, des préparations acides sont appliquées directement sur la verrue et, d'autre part, des ablations chirurgicales sont pratiquées par un médecin qui peut utiliser la thérapie au laser ou la cryothérapie (traitement par le froid à l'azote liquide). Les verrues peuvent aussi être traitées en automédication à domicile via un traitement à base d'Acide Trichloroacétique (Traitement au Gel TCA Wartner® by Cryopharma®).

Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie offre une méthode rapide, sûre et efficace pour traiter les verrues à domicile.

Si la verrue est de taille supérieure à 7,5mm, consulter un médecin avant toute utilisation.

B. Qu'est ce que Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie et quelle est son utilité ?

Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie est un dispositif médical indiqué dans le traitement des verrues communes et des verrues plantaires.

Sa méthode de traitement par le froid est basée sur le même principe que celui utilisé par le médecin.

1. Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie gèle la verrue au cœur de la racine. Lors de l'application de l'embout mousse sur la verrue, le froid peut entraîner un blanchiment de la peau et une sensation de brûlure. Ceci est une conséquence normale de l'application. Dès le retrait de l'embout mousse, la peau reprend sa couleur normale. La disparition de la sensation de brûlure peut cependant prendre quelques heures.

2. Après une application, la verrue se détache dans les 10 à 14 jours suivants et laisse place à une nouvelle peau saine.

Il est possible que le froid entraîne la formation d'une ampoule invisible à l'œil nu sous la verrue. Celle-ci disparaîtra avec la verrue.



C. Effets indésirables

• Il est important d'utiliser Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie conformément aux instructions d'utilisation présentes sur la notice, pour minimiser tous risques d'effets secondaires. Bien que les effets secondaires énoncés ci-dessous aient été rapportés, ils présentent un caractère très exceptionnel.

• De même que toutes les autres méthodes de traitement par le froid, Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie est susceptible de causer une dépigmentation temporaire de la peau et de petites brûlures en raison de la température très basse obtenue pour le traitement.

• Il est important de suivre scrupuleusement les temps d'application, car un temps d'application trop long peut entraîner une altération des couches supérieures de l'épiderme et donc engendrer des cicatrices et des lésions nerveuses.

• De même, le non respect des temps d'application peut entraîner un dépôt de produit sur la peau saine au niveau des doigts et des orteils, ce qui peut conduire à des lésions locales de l'épiderme.

• Dans certains cas, des ampoules de tailles importantes peuvent apparaître, ce qui peut occasionner une douleur passagère.

D. Précautions d'emploi

- En cas de doute concernant le diagnostic d'une verrue, consulter un médecin.
- Ne pas utiliser sur des zones sensibles comme le visage, le cou, les aisselles, la poitrine, les fesses ou les parties génitales.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, infectée, rouge ou présentant des signes d'inflammation tels que des démangeaisons ou un gonflement.
- Ne pas utiliser dans les cas suivants : grains de beauté, taches noires, taches de pigmentation, présence de follicules pileux ou toute autre anomalie de la peau ressemblant à une verrue.
- Utilisation réservée à l'adulte.
- Ne pas utiliser sur des enfants de moins de 4 ans.
- Ne pas utiliser en cas de grossesse, d'allaitement, de diabète.
- En cas de problèmes de circulation, consulter un médecin avant toute utilisation.
- Usage externe uniquement.
- Dans le cas d'une verrue sur le dos de la main, bouger lentement les doigts pendant l'application du produit.
- Éviter tout contact avec la peau saine. Ne pas appliquer le produit autour de la verrue.
- Ne pas avaler, ni inhaler le produit intentionnellement.
- Se laver les mains après usage en évitant la zone traitée.
- Utiliser Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie uniquement avec les embouts mousse fournis dans l'emballage.
- Utiliser un embout mousse par application et le jeter. Ne pas réutiliser les embouts mousse.
- Ne pas exercer de pression excessive lors de l'application.
- Appliquer l'embout mousse pendant 20 secondes maximum pour une verrue commune et 40 secondes maximum pour une verrue plantaire. Réduire ces temps d'application en cas de blanchiment de la verrue et de la peau.
- En cas de verrues multiples, les unes à côté des autres, ne traiter qu'une seule verrue à la fois en respectant un intervalle de 2 semaines entre les traitements.
- En cas de verrues anciennes ou de grandes tailles, plusieurs traitements peuvent être nécessaires. Bien respecter un intervalle de 2 semaines entre les traitements. Ne pas faire plus de 3 traitements sur une même verrue. Si la verrue ne disparaît pas après 3 traitements, consulter un médecin.
- La date de péremption et le numéro de lot du produit sont indiqués sur le dessous de l'étui et de l'aérosol.
- Wartner® by Cryopharma® Cryothérapie est contenue dans un récipient sous pression contenant des composants extrêmement inflammables :
- Ne pas vaporiser en direction d'une flamme ou un corps incandescent.
- Utiliser ce produit uniquement dans une pièce bien ventilée.
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition (flamme, étincelle), source de chaleur, rayons solaires, sources électrostatiques et électriques.
- Ne pas fumer. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
- Récipient sous pression, peut exploser si chauffé.
- De préférence, lors de l'utilisation, tenir l'aérosol droit, loin du corps, plutôt que de le placer sur une surface solide.
- Ne pas percer. Ne pas brûler.
- Conserver dans un endroit sûr à température ambiante et hors de portée des enfants.
- Les aérosols entièrement vidés peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Les autres composants doivent être jetés avec les déchets spécifiques.

E. Éléments contenus dans l'emballage

- 1 Aérosol contenant un mélange de diméthyléther et de propane (respectueux de l'environnement).
- 1 support réutilisable pour les applicateurs en mousse.
- 12 embouts en mousse à usage unique. Valables pour 12 traitements.
- 1 lime réutilisable pour le traitement des verrues plantaires.
- 1 notice.

F. Mode d'emploi et durée de traitement

Lire attentivement et entièrement la notice avant toute utilisation de la Cryothérapie Wartner® by Cryopharma®.

Mode d'emploi :

Suivre les instructions d'utilisation présentées à droite de la notice.

Durée de traitement :

Généralement, après une application, la verrue se détache dans les 10 à 14 jours suivants et laisse place à une nouvelle peau saine.

En cas de verrues anciennes ou de grandes tailles, plusieurs traitements peuvent être nécessaires. Ainsi, si la verrue ne disparaît pas suite au premier traitement, il est possible de réitérer celui-ci. Bien respecter un intervalle de 2 semaines entre les traitements. Ne pas faire plus de 3 traitements sur une même verrue. Si la verrue ne disparaît pas après 3 traitements, consulter un médecin. Utiliser un seul applicateur en mousse par application et le jeter.

Mode d'emploi :

Utilisation simple en 4 étapes

ETAPE 1

Tenir l'applicateur en mousse entre le pouce et l'index et appuyer jusqu'à ce qu'une petite ouverture apparaisse du côté bleu. Enfoncer alors le support de l'applicateur dans l'applicateur en mousse.



ETAPE 2

Tenir fermement et droit l'aérosol dans une main. Introduire l'applicateur en mousse dans l'aérosol jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. Un sifflement est alors audible. Maintenir l'applicateur en mousse dans l'aérosol pendant 3 secondes puis le retirer. L'applicateur en mousse est alors imprégné du produit froid. La différence de température entre l'applicateur en mousse et la pièce peut entraîner un phénomène de condensation (vapeur blanche). Ce phénomène n'est pas dangereux.



ETAPE 3

Attendre 20 secondes avant d'appliquer l'embout mousse sur la verrue afin d'atteindre une température de traitement optimale.



ETAPE 4

Maintenir l'extrémité blanche de l'applicateur en mousse sur la verrue :

- 20 secondes pour les verrues communes
- 40 secondes pour les verrues plantaires



Lors de l'application, maintenir un contact constant avec la zone à traiter. Une sensation de picotement et une légère douleur peuvent être ressenties en raison de la température très froide du produit. Respecter scrupuleusement les temps d'application. Une fois le traitement appliqué, attendre 2 minutes et à l'aide d'un linge, retirer l'embout mousse du support. Puis le jeter. Ne pas toucher l'applicateur en mousse à main nue pour éviter toute contagion.

ETAPES SUPPLEMENTAIRES POUR LES VERRUES PLANTAIRES

PREPARATION

Tremper le pied à traiter dans de l'eau chaude pendant 5 minutes. Puis frotter la callosité recouvrant la verrue avec la lime incluse dans l'étui.



Traitement

Reprendre les étapes 1 à 4 ci-dessus.

Post-traitement

Suite au traitement, il est possible de ressentir un inconfort dû à la pression ou au frottement des chaussures. Dans ce cas, il est conseillé de protéger la zone sensible avec un pansement de confort (non inclus dans l'étui).



C. Suivi du traitement

- Garder la surface de la peau traitée propre.
- Ne pas gratter et ne pas toucher la verrue traitée.
- Ne pas percer l'ampoule et la protéger si nécessaire avec un pansement.
- Il est possible de nager et prendre une douche après le traitement.
- Consulter votre médecin si les sensations de douleur ou de brûlure persistent ou si d'autres complications se produisent.

Omega Pharma International nv, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgique
 Distributeur : Laboratoires Omega Pharma France, 20 rue André Gide
 BP 80-92321 Châtillon Cedex, France.
 Plus d'informations sur : www.wartner.eu/sites/fr

Dernière révision de la notice : Mars 2015.

59-34093-0553 LF00902A