

Ⓢ WARTNER PRO on lääkinällinen laite käsi- ja jalkasylien tehokkaaseen poistoon. Se sisältää trikloorietikkahappoa (TCA), joka poistaa syyllän ja tuhoaa viruksen. Syyllän irrotta tilalle kasvaa uutta ihoa. **Ainesosat:** Trikloorietikkahappo (TCA) 40%, vesi.

⚠ **Lue käyttöohje (pahvin sisäpuolella) huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.**

**Varoitukset ja varoimenpiteet:** TCA on voimakkaasti syövyttävä happo. Käsiteltävä erittäin varovasti.

- Ei sovellu alle 4-vuotiaille lapsille
- Ei suositella diabeetikoille
- Vain käsi- ja jalkasylien poistoon
- Vain henkilökohtaiseen käyttöön
- Soveltuu vain ulkoiseen käyttöön käsissä ja jaloissa. Ei sovellu käytettäväksi muihin kehon osiin
- Älä käytä avohaavoihin tai artyneelle iholle
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa
- Hoidettu alue tulee suojata auringonvalolta 30 päivää hoidon lopettamisen jälkeen.

**Hävitä tuote, jos:**

- Pakkaus tai tuote on vaurioitunut
- Laitteen kärki ei murru, kun korkkia käännetään ensimmäisellä käyttökerralla
- Sinistä painiketta painettaessa ei kuulu ääntä

**Käännä lääkäriin tai ihotautilääkäriin puoleen, jos:**

- Tuotetta käytetään yhdessä muiden hoitojen kanssa
- Kärsit sivuvaikutuksista tai allergisista reaktioista
- Oireet eivät lieyviä 6 viikon hoidon jälkeen
- Olet raskaana tai imetät

Hävitä tuote kansainvälisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Tietoa hävittämisestä ja kierrättämisestä saa osoitteesta [www.omega-pharma.fi](http://www.omega-pharma.fi).



**Säilytä tämä pakkausseloste. Se sisältää tärkeää tietoa.**



**Älä ota korkkia pois ennen kuin olet kiertänyt sitä (katso vaihe 1 käyttöohjeissa)!**




**Älä paina sinistä painiketta korkin**

ollessa kiinni. Jos painat sinistä painiketta ennen korkin poistamista, avaa korkki erittäin varovasti ja puhdista kärki ja korkki huolellisesti paperipyyhkeellä.



**Vältä TCA-liuoksen joutumista**

**terveelle iholle.** Mikäli TCA-liuosta joutuu iholle, pyyhi aine välittömästi kuivalla vanupuikolla, jotta et kuori tervettä ihoa.

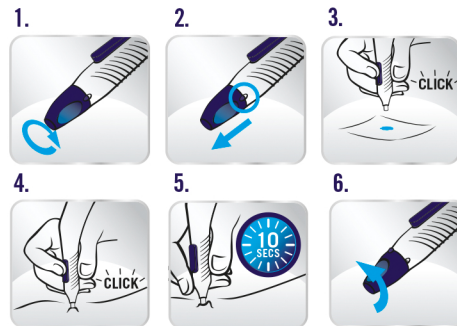

### Käyttöohje

1. Ensimmäisellä käyttökerralla: kierrä korkkia vähintään 3 kierrosta aktivoiaksesi mekanismin. Muuten kynästä tulee käyttökelvoton.
  2. Kohdistaa sininen (korkissa) ja valkoinen (kynässä) merkintä samaan kohtaan. Vedä sen jälkeen korkki pois.
  3. Paina sinistä painiketta kunnes pieni tippa ilmestyy paperipyyhkeelle.
  4. Aseta laitteen kärki syyllän pintaa vasten ja paina sinistä painiketta.
  5. Paina kärki syyllää vasten noin 10 sekunnin ajan. Syyllä muuttuu yleensä valkoiseksi, mikä on tavallista hoidon yhteydessä. Jos syyllä on isompi (> 6mm), saatat joutua lisäämään ainetta.
  6. Annostelun jälkeen: sulje korkki tiukasti. Lukitaksesi kynän kierrä korkkia niin, että sininen ja valkoinen merkintä eivät ole linjassa.
- Toista käsittely kerran viikossa korkeintaan 6 viikon ajan tai kunnes syyllä on irronnut.

Paremmen tuloksen saamiseksi suosittelemme jalkojen tai käsien liottamista lämpimässä vedessä 5 minuutin ajan ennen käsittelyä.

Syyllä saattaa tummentua hoitajakson aikana. Tämä on normaalia ja kuuluu paranemiseen.

Saatat huomata pistelyä hoitokohdassa. Tämä on normaalia ja ohimenevää. Mikäli epämiellyttävä tunne jatkuu useita päiviä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Käsiteltyä ihoa tulisi suojata auringolta 30 päivää hoidon jälkeen.

Käytä 6 viikon kuluessa tuotteen avaamisesta.

Tarkastettu viimeksi toukokuussa 2016