

WARTNER®

Zamrzivač bradavica na stopalima - Nova, poboljšana formula (HR) Za uklanjanje bradavica na stopalima

Zamrzava bradavice do jezgre

PRIJE PRIMJENE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU

A. Što su bradavice?

Bradavice su bezopasne izrasline na koži koje izaziva humani papiloma virus (HPV).


Postoje različite vrste, a najčešće su obične bradavice.

Sastojte se od vezivnog tkiva (jezgra) koje se hrani putem krvnih žila i prekrivene su naslagama vanjskog kožnog tkiva.

Obične bradavice prepoznajemo po gruboj površini nalik cvjetajući. Najčešće se nalaze na rukama, koljenima i laktovima.

Bradavice na stopalima slične su običnima, ali se pojavljuju samo na tabanima ili ispod nožnih prstiju.

Obično su posnatije i često bole zbog pritiska pri hodanju. Wartner® zamrzivač bradavica na stopalima posebno je oblikovan za uklanjanje bradavica na stopalima i plantarnih bradavica, pri čemu se primjenjuju i dva dodatna koraka za optimalnu pripremu i njegu kože prije i nakon uklanjanja bradavica na stopalima.

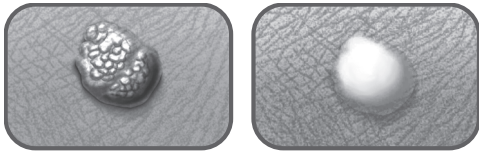

Bradavice se pojavljuju u 7 do 10 posto ljudi, a najčešće u djece i adolescenata. Vrlo su zarazne, a najčešće nastaju kada je imunitet oslabljen. Bradavice se mogu prenositi s osobe na osobu neposrednim dodirima sa zaraženim mjestom, a mogu se prenijeti i s jednog na drugo mjesto na tijelu iste osobe. Više od 50 posto bradavica nestane samo od sebe, bez uklanjanja, unutar dvije godine. Ipak, većina ljudi odluči ukloniti bradavice jer mogu biti neugodnog izgleda, a u slučaju bradavica na stopalu i bolne.

Tradicionalno postoje dva osnovna načina uklanjanja bradavica: prvi uključuje kisele pripravke za primjenu izravno na bradavicu, a drugi uklanjanje koje provodi liječnik metodama laserske terapije, spaljivanja ili krioterapije (zamrzavanje tekućim dušikom).

Wartner® je brz, učinkovit i jednostavan način uklanjanja bradavica kod kuće koji se temelji na krioterapiji. Za uklanjanje bradavice veće od 7,5 mm obratite se svom liječniku.

B. Kako djeluje Wartner®?

Wartner® uklanja bradavice metodom zamrzavanja koju primjenjuju i liječnici:

1. Odmah nakon nanošenja, Wartner® zamrzava bradavicu do jezgre.

Kada pjenasti nastavak pritisnete na bradavicu, koža pobijeli te se zbog zamrzavanja osjeća neznatno bolno bockanje. Nakon uklanjanja pjenastoga nastavka, koža poprima svoju normalnu boju. Bolan osjećaj bockanja ubrzo jenjava i trebao bi nestati za nekoliko sati.

2. Nakon što se ugrije, zamrznuto područje pocrveni. Zbog zamrzavanja, ispod bradavice u roku od nekoliko dana nastaje mjehur koji se ne mora vidjeti golim okom. Tretirana bradavica postupno nestaje ili otpada u sljedećih 10 do 14 dana, a ispod nje nastaje nova, zdrava koža.



C. Nuspojave:

- Kao u svim metodama zamrzavanja, koža privremeno može pobijeljati.
- Proizvod je važno upotrebljavati u skladu s uputama za uporabu jer pretjerano izlaganje proizvodu za zamrzavanje može oštetiti gornje slojeve kože te izazvati ožiljke i/ili oštećenje živca.
- Ako se zdravo tkivo na prstima na ruci ili nozi izloži proizvodu (što se može dogoditi ako se nastavak zadržati na bradavici dulje od naznačenoga vremena), može doći do lokalnog odumiranja tkiva.
- U nekih ljudi mogu nastati veći i bolni mjehuri.
- Otpadanje bradavice može izazvati depigmentaciju i/ili male ožiljke.
- Pri uporabi Wartnera® mogu nastati manje opekline zbog niske temperature zamrzavanja proizvoda, ali takve nuspojave nisu česte.
- Neizmerno je važno Wartner® upotrebljavati u skladu s uputama za uporabu jer se na taj način smanjuje mogućnost nuspojava (pročitajte upute za uporabu).

D. Upozorenje: Slučajevi u kojima ne smijete upotrebljavati Wartner®:

Ako niste u potpunosti sigurni je li izraslina na koži bradavica, prije uporabe Wartnera® obratite se liječniku.

Ovaj proizvod smiju nanositi samo odrasli. Nemojte upotrebljavati u djece mlađe od 4 godine starosti. Nemojte upotrebljavati tijekom trudnoće ili dojenja. Nemojte upotrebljavati ako imate šećernu bolest jer zamrznuto područje kože neće tako brzo ili potpuno zarasti. Osobe s lošom cirkulacijom prije uporabe Wartnera® trebaju se obratiti svojem liječniku.

Wartner® nemojte upotrebljavati na tankoj ili osjetljivoj koži, primjerice na licu, vratu, pazusima, prsima, stražnjici ili spolnim organima. Nemojte ga upotrebljavati na nadraženoj koži ili području koje je inficirano, crveno ili pokazuje znakove upale kao što su svrbež ili oteklina. Proizvod nemojte upotrebljavati na bradavicama ako iz njih izrastaju dlake, na madežima, tamnim madežima, pigmentiranoj koži ili na drugim neuobičajenim oblicima na koži.

E. Mjere opreza:

- Ako niste sigurni je li izraslina na koži bradavica, obratite se liječniku.
- Primjereno samo za vanjsku uporabu; nemojte progutati ili udahnuti, upotrebljavajte samo u dobro prozračenim prostorijama.
- Neposredno nakon uporabe operite ruke.
- Wartner® upotrebljavajte samo u kombinaciji s posebnim priloženim pjenastim nastavcima.
- Za svaku bradavicu upotrijebite novi pjenasti nastavak, koji je za jednokratnu uporabu.
- Ako je bradavica na vrhu noge, polako razmaknite prste na nozi pri nanošenju proizvoda.
- Izbjegavajte dodir sa zdravom kožom oko bradavice koju ćete ukloniti.
- Nemojte previše pritisnuti pjenasti nastavak na bradavicu.
- Nemojte doticati područje oko bradavice.
- Pjenasti nastavak držite najviše 40 sekundi na bradavici na stopalu ili manje ako bradavica i koža oko nje pobijele.
- Ako imate više bradavica koje su blizu jedna drugoj, posebice na stopalu ili prstima na nozi, uklanjajte ih odvojeno, jednu po jednu, u razmaku od dva tjedna nakon prethodnog uklanjanja.
- Stare i velike bradavice teško se uklanjaju i za njih neće biti dovoljno samo jednom nanijeti proizvod Wartner®.
- Ako je proizvod potrebno nanijeti više puta, postupak ponovite nakon dva tjedna. Nemojte istu bradavicu uklanjati više od tri puta. Ako nakon tri nanošenja proizvoda ne primijetite poboljšanje, obratite se svom liječniku.
- Rok valjanosti i broj serije (LOT) navedeni su na pakiranju i dnu aerosolnog raspršivača.

- Wartner® sadržava iznimno zapaljive sastojke: upotrebljavajte ga samo u dobro prozračenim prostorijama, najmanje 1 m od otvorenog plamena, izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti te elektrostatičnih i električnih izvora, uključujući svjetla. Nemojte pušiti ili držati zapaljenu cigaretu u blizini proizvoda tijekom uporabe. Tijekom uporabe proizvod nemojte izlagati temperaturama višima od 50 °C (primjerice, električno svjetlo). Raspršivač držite uspravno u slobodnom prostoru dalje od tijela i nemojte ga stavljati na tvrdnu površinu.
- Nemojte bušiti ili paliti praznu ambalažu nakon uporabe.
- Čuvajte na suhom mjestu izvan doseg djece.

F. Wartner® zamrzivač bradavica na stopalima sadržava:

- Aerosolni raspršivač, koji sadržava mješavinu dimetil etera i propana koja nije štetna za okoliš. CE 0344
- 1 plastični držač za višekratnu uporabu na koji se stavljaju pjenasti nastavci
- 12 jednokratnih pjenastih nastavaka za 12 uklanjanja
- 1 turpijicu za višekratnu uporabu CE
- 12 pjenastih flastera CE
- Upute za uporabu, koje sadržavaju detaljne informacije o bradavicama i proizvodu Wartner® - kako djeluje i kako se njime učinkovito koristiti za uklanjanje bradavica na stopalima.

G. Upute za uporabu:

Prije uporabe Wartnera® temeljito pročitajte upute za uporabu.

10 do 14 dana nakon uporabe proizvoda Wartner® bradavice obično nestaju. Za stare i velike bradavice često je potrebno više puta nanijeti Wartner®. Ako 14 dana nakon uporabe bradavica ili dio bradavice ne otpadne, ponovno upotrijebite proizvod Wartner®. Svaki pjenasti nastavak upotrebljavajte samo jednom, a nakon toga ga bacite. Ako nakon 3 nanošenja proizvoda Wartner® ne primijetite poboljšanje, obratite se svom liječniku.

Proizvođač:
Omega Teknika - Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland

Nositelj upisa:
Clinres farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61
10000 Zagreb
Hrvatska
www.wartner.com
info@adriaticbst.com

Datum posljednje revizije upute: prosinac 2011.

JEDNOSTAVNE UPUTE ZA UPORABU U 6 KORAKA ZA UKLANJANJE BRADAVICA NA STOPALIMA

1. KORAK

Prvo 5 minuta namačite stopalo u toploj vodi, a nakon toga turpijom uklonite višak rožnate kože oko bradavice.



2. KORAK

Plavi kraj pjenastoga nastavka primite između palca i kažiprsta te ga stisnite dok se ne pojavi malen otvor. Otvor pjenastoga nastavka postavite na štipačasti plastični držač i potpuno uvucite držač, koji se više ne bi trebao vidjeti.



3. KORAK

Aerosolni raspršivač držite uspravno, dalje od tijela i otvorenoga plamena, izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti i električnih izvora. Plastični držač s pjenastim nastavkom namjestite na otvor na vrhu aerosolnoga raspršivača, tako da se pjenasti nastavak više ne vidi. Aerosolni raspršivač držite čvrsto jednom rukom pri dnu, a drugom rukom čvrsto pritisnite držač nastavka prema dolje i držite ga 3 sekunde (brojite od 21 do 23). Pri tome ćete začuti zvuk pištanja. Izvucite držač s pjenastim nastavkom iz otvora. Pjenasti nastavak natopio se hladnom tekućinom te će nastati kondenzat koji nije škodljiv.



4. KORAK

Nakon natapanja pjenastoga nastavka, pričekajte 20 sekundi prije nanošenja proizvoda kako bi se temperatura nanosa dodatno snizila te kako bi Wartner® bio još učinkovitiji.



5. KORAK

Nakon protoka 20 sekundi, lagano pritisnite držač s pjenastim nastavkom na bradavicu na 40 sekundi.



Pjenasti nastavak tijekom uporabe nemojte odizati od bradavice koju želite ukloniti. Pjenasti nastavak držite na površini bradavice onoliko koliko je preporučeno. Zamrzavanje može izazvati osjećaj neznatno bolnoga bockanja. Nakon uporabe proizvoda pričekajte 2 minute, a zatim papirnatim rupčićem izvucite pjenasti nastavak iz držača. Poslije uporabe bacite pjenasti nastavak jer je on namijenjen za jednokratnu uporabu. Nemojte dodirivati vrh pjenastoga nastavka golim rukama jer biste inače mogli kožu ponovno zaraziti virusom koji izaziva bradavice.

6. KORAK

Upotrijebite pjenasti flaster da zaštitite osjetljivo područje nakon primjene. Flaster ljepljivom stranom zalijepite na kožu tako da se rupica u sredini flastera nalazi izravno na zamrznutom području/bradavici.



H. Nakon tretmana:

- Područje na kojem ste uklonili bradavicu držite čistim.
- Možete se kupati i tuširati.
- Područje na kojem je bila bradavica nemojte dirati ili grepti.
- Mjehure prema potrebi zaštitite flasterom; nemojte ih bušiti. Kod bradavica na tabanu preporučujemo uporabu priloženih pjenastih flastera.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako i dalje osjećate bolno bockanje ili neku drugu tegobu.