

WARTNER®

HR

Olovka za uklanjanje kurjih očiju
(4ml e)

Za uklanjanje kurjih očiju i tvrdokornih natisaka

PRJE PRIMJENE WARTNER OLOVKE ZA UKLANJANJE KURJIH OČIJU PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU.

A. Što je Wartner olovka za uklanjanje kurjih očiju i za što se upotrebljava?

Wartner olovka za uklanjanje kurjih očiju medicinski je proizvod za tretiranje zadebljane kože i promjena na koži poput kurjih očiju i tvrdokornih natisaka, koje uzrokuju stalni pritisak na kožu (primjerice, zbog nošenja neprikladne i tijesne obuće). Kako bi se zaštitila, koža reagira na stalno trenje stvaranjem zadebljanja, a ako se pritisak nastavi, zadebljanje se može pretvoriti u bolne oči. Wartner olovka za uklanjanje kurjih očiju sadržava visokokonzentrirani gel za uklanjanje kurjih očiju i natisaka. TCA gel potiče ljuštenje kože. Tijekom tog procesa kožna zadebljanja / kurje oči nestat će i stvorit će se nova, zdrava koža.

B. Što morate znati prije uporabe olovke za uklanjanje kurjih očiju?

Nema poznatih interakcija s drugim lijekovima. Pri uporabi nisu uočene nikakve nuspojave. Ne upotrebljavajte zajedno s drugim terapijama za kurje oči. Ako ste trudni ili dojite, prije primjene zatražite savjet liječnika ili ljekarnika. Ne upotrebljavajte ovaj lijek oko četiri godine. Ako ste dijabetičar, prije uporabe obratite se liječniku.

C. Upute za uporabu

Prije prve primjene okrenuti dozator na vrhu olovke do kraja u smjeru kazaljke na satu dok se ne pojavi gel. Nekoliko okretaja trebalo bi biti dovoljno dok se ne pojavi prva kap. Tijekom sljedećih nanošenja polako okrećite dozator dok se ne oblikuje kap gela, a zatim je nježno nanosite na zahvaćeno područje. Ako slučajno nanosite preveliku količinu gela na zdravu kožu, odmah ga isperite s mnogo vode i sapuna, a zatim pažljivo nanosite ispravnu količinu gela.

D. Upozorenje

- TCA je izrazito korozivna kiselina. TCA gel nanosite isključivo na područje koje se tretira. Izbjegavajte nanošenje na zdravu kožu. U slučaju da gel nanosite na zdravu kožu, moglo bi doći do korozije, tako da je tijekom primjene potreban KRAJNJI oprez.
- Samo za vanjsku uporabu.
- Ne primjenjujte na zdravu kožu. U slučaju da gel dođe u kontakt sa zdravom kožom, odmah isperite područje velikom količinom vode i sapuna.
- Ne dozvolite da vam Wartner olovka za uklanjanje kurjih očiju padne na odjeću, nakit, tkaninu ili namještaj jer ih može oštetiti.
- U slučaju iritacije, crvenila ili boli, isperite područje s mnogo vode i sapuna i obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ako se ne slijede upute za upotrebu, može doći do iritacije kože, bolova i peckanja.
- Ne nanositi na oštećenu kožu, kožu s infekcijom ili crvenilom te kožu koja pokazuje znakove upale poput svrbeža ili otekline.
- Prevelike količine mogu uzrokovati iritaciju kože.
- Ako kurje oko ne nestane nakon 4 tretmana, zatražite savjet liječnika.
- Ako niste sigurni je li riječ o kurjem oku ili natisaku, zatražite savjet liječnika.

E. Važna informacija

- Važno je primjenjivati proizvod točno kako je navedeno jer može uzrokovati privremeno peckanje, bolove, ranice i gubljenje boje okolne kože.
- Koža nakon primjene može privremeno poblijeliti.
- Tretiranu kožu treba zaštititi od izravnog izlaganja UV zrakama i suncu.

F. Čuvanje

Čuvati na sigurnom, suhom i tamnom mjestu na sobnoj temperaturi (15-25°C). Držati izvan dohvata i pogleda djece. Nakon svakog tretmana pažljivo ispirajte maramicom očistite kist prije nego što spremite olovku.

Sastav

Triklorooctena kiselina

Datum posljednje revizije upute: veljača 2012.

Serijski broj (LOT) i rok uporabe označeni su na olovci i na kutiji.

	Proizvođač: Medical Brands Veembroederhof 96, 1019 HC Amsterdam, NL
	Nositelj upisa: Cinres farmacija d.o.o., Srebrnjak 61, 10000 Zagreb Hrvatska



Prije tretmana

Prvo namočite stopalo u toplu vodu na 5 minuta i pažljivo turpijom ostružite natisak. Temeljito osušite stopalo tako da između zahvaćenog područja i gelom ne bude vode / vlage. Ne nanosite TCA gel na kožu koja krvari ili je oštećena. Turpija nije uključena.



KORAK 2

Držite olovku u tom položaju 3 do 5 sekundi kako bi se gel spustio u vrh kista.



KORAK 3

Pažljivo nanosite gel isključivo na kurje oko ili natisak (izbjegavajte primjenu na okolnu zdravu kožu). Ovisno o veličini područja koje se tretira, bit će potrebna jedna ili više kapi.



KORAK 4

Prije nego što obujete cipele, pustite da se gel suši 10-15 minuta. Ponavljajte jednom dnevno tijekom 4 dana.



KORAK 1

Držite olovku okomito tako da je kist okrenut prema dolje. Polako okrenite dozator na vrhu olovke u smjeru kazaljke na satu.

Jednostavna primjena u 4 koraka

Nakon 4 dana tretmana, koža će se tijekom sljedećih 4 dana ljuštiti. Kožu koja se ljušti pažljivo sastružite u mlakoj vodi. Nakon tretmana stvorit će se nova, zdrava koža (bez kurjih očiju ili natisaka). Kurje oči ili natisaci mogu nestati već prvog tjedna tretmana. Ako kurje oko ili natisak ne nestane u potpunosti, ponovite tretman nakon prekida od 4 dana. Tretman se može ponoviti do 4 puta. Nakon tretmana pažljivo ispirajte maramicom očistite kist prije nego što spremite olovku.

CE 0086