

WARTNER®

SRB Olovka protiv kurjih očiju (4ml)

Olovka za uklanjanje kurjih očiju i tvrdokornih žuljeva

PAŽLJIVO PROČITAJTE KOMPLETNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU KAKO BI IZBEGLI NEPRAVILNU PRIMENU WARTNER® OLOVKE PROTIV KURJIH OČIJU

A. Šta je Wartner® olovka protiv kurjih očiju i za šta se koristi?

Wartner® olovka protiv kurjih očiju je medicinsko sredstvo za tretman zadebljanja na koži, poput kurjih očiju i tvrdokornih žuljeva, koji nastaju kao posledica vršenja konstantnog pritiska na određenim delovima kože (na pr. usled nošenja suviše tesne obuće). Konstantno trenje stimuliše kožu da se, kao posledica odbrambenog mehanizma, zadebljava, ali ukoliko se pritisak nastavi, mogu da nastanu bolne lezije na koži. Aplikator olovke sadrži visoko koncentrovan gel za uklanjanje kurjih očiju i tvrdokornih žuljeva. TCA gel podstiče ljuštenje kože. Kao posledica toga dolazi do uklanjanja zadebljanja na koži ili kurjeg oka, i formiranja nove, zdrave kože.

B. Šta morate da znate pre upotrebe Wartner® olovke protiv kurjih očiju?

Interakcije sa drugim preparatima nisu poznate. Nisu poznati neželjeni efekti Wartner® olovke protiv kurjih očiju. Ne koristite je istovremeno sa ostalim tretmanima za uklanjanje kurjih očiju. Ako ste trudni ili dojite, pre upotrebe se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ne primenjujte proizvod kod dece mlađe od 4 godine. Ukoliko imate dijabetes, posavetujte se sa lekarom.

C. Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe, neophodno je da dozer na vrhu olovke okrenete nekoliko puta u pravcu kazaljke na satu, da bi se gel spustio u vrh olovke sa četkicom. Možda će biti potrebno da okrenete nekoliko punih krugova da biste uočili prvu kap. Tokom svake sledeće primene, dozer polako okrećite dok se ne pojavi kap gela, koju nakon toga možete pažljivo da spustite na zahvaćeni predeo. Ukoliko se slučajno oslobodi suviše velika kap i višak gela dođe u kontakt sa zdravom kožom, odmah isperite celu površinu obilnom količinom vode i sapuna, a zatim ponovo pažljivo nanesite odgovarajuću količinu gela. Obratite pažnju na to da u vrhu olovke može da ostane mala količina gela, zbog toga treba voditi računa pri ponovnom otvaranju olovke.

D. Upozorenja

• Trihloroacetna kiselina (TCA) je vrlo korozivna kiselina. TCA primenjujte isključivo direktno na zahvaćeno područje, ne dodirujući zdravu kožu oko. Ukoliko se koristi na zdravoj koži može da

dođe do pojave korozije određenog stepena. Zbog toga treba STROGO VODITI RAČUNA prilikom primene TCA gela.

- Samo za spoljašnju upotrebu.
- Ne dodirujte zdravu kožu. U slučaju da gel dođe u kontakt sa zdravom kožom, isperite taj deo obilnom količinom vode i sapuna.
- Ne dozvolite da gel iz Wartner® olovke dođe u kontakt sa Vašom odećom, nakitom, tkaninama ili namешtajem jer može da ih ošteti.
- U slučaju pojave iritacije, crvenila ili bola na tretiranom području, isperite ga obilnom količinom vode i sapuna, i potražite savet lekara ili farmaceuta.
- Ukoliko ne pratite uputstvo za upotrebu može doći do pojave iritacije, bola i peckanja.
- Ne primenjujte na iritiranu, inficiranu ili crvenu kožu, ili na kožu koja pokazuje neke od znakova upale, poput svraba ili otoka.
- Upotreba preterane količine gela može da izazove iritaciju.
- Ukoliko tretirano zadebljanje ne nestane nakon 4 ponovljena tretmana, konsultujte Vašeg lekara.
- Ukoliko niste sigurni da li je promena na koži kurje oko ili tvrdokorni žulj, konsultujte Vašeg lekara.

E. Važne informacije

- Važno je da proizvod koristite tačno prema uputstvu. Preterano izlaganje kože ovom preparatu može da dovede do pojave prolaznog osećaja peckanja i bola, blagih ulceracija, i prolazne depigmentacije kože oko tretiranog područja.
- Tretirani deo kože može privremeno da pobeli nakon aplikacije.
- Tretirani deo kože treba zaštititi od UV zračenja i izlaganja suncu.

F. Način čuvanja

Čuvati na sigurnom, suvom i tamnom mestu, na sobnoj temperaturi (15-25°C). Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Dobro zatvorite olovku nakon svake primene. Po završetku tretmana, pažljivo očistite olovku papirnom maramicom pre njenog odlaganja.

Aktivni sastojak:

Trihloroacetna kiselina

Proizvođač: medical brands

Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam, Holandija
SRB Distributer i nosilac upisa u registar:
Adriatic Distribution d.o.o. Beograd
Ljubostinjska 2/C5 11000 Beograd Srbija
Broj upisa u registar:
515-02-2104-12-001 od 10.12.2012.
Za više informacija posetite:
www.wartner.com



Poslednja revizija uputstva za upotrebu: septembar 2012.

Jednostavna primena u 4 koraka

Pre tretmana



Prvo, potopite stopalo u toplu vodu na 5 minuta. Zatim, turpijom pažljivo sastružite površinski sloj zadebljale kože. Temeljno ga osušite tako da između zadebljanja na koži i Wartner® gela ne bude vode/vlage. Ne nanosite gel na kožu koja kvvari ili je oštećena. Turpija nije priložena u pakovanju.



klik

KORAK 1

Držite olovku uspravno sa četkicom okrenutom na dole. Polako okrećite (pri čemu se čuje klik) dozer na vrhu olovke u pravcu kazaljke na satu kako bi se oslobodio gel.



3-5 sek.

KORAK 2

Pustite da se četkica puni gelom 3 do 5 sekundi.



KORAK 3

Oslobođeni gel pažljivo nanesite isključivo na zahvaćeno područje (izbegavajući kontakt gela sa zdravom kožom oko). U zavisnosti od veličine zahvaćenog predela, biće potrebna jedna ili više kapi.



10-15 min.

KORAK 4

Ostavite gel da se osuši 10-15 minuta pre nego što se obujete.

Koristite jednom dnevno 4 dana.

Nakon tretmana od 4 dana, koža će se ljuštiti tokom sledeća 4 dana. Kožu koja se ljušti možete pažljivo da odstranite pod mlazom mlake vode. Po završetku tretmana, formiraće se nova, zdrava koža (bez zadebljanja). Tretirano zadebljanje može da nestane tokom prve nedelje tretmana. Ukoliko zadebljanje ne nestane u potpunosti, ponovite tretman nakon pauze od 4 dana. Tretman možete da ponovite do 4 puta.

Po završetku tretmana, pažljivo očistite četkicu papirnom maramicom pre njenog odlaganja.

CE0086

2441A