

WARTNER®

Penna per Verruche (1.5ml e)

Per la rimozione delle verruche comuni e plantari. Indicato solo per mani e piedi.

▲ LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER EVITARE UN USO SCORRETTO DELLA PENNA PER VERRUCHE WARTNER®

L'applicatore a penna contiene un gel ad alta concentrazione, è quindi necessario applicare il gel goccia a goccia fino a ricoprire completamente la superficie della verruca con un sottile strato di gel. Non trattare la pelle sana circostante la verruca. Nel caso in cui il gel entri a contatto con la pelle sana, pulire l'area interessata con abbondante acqua e sapone.

A. Che cosa sono le verruche comuni e plantari

Le verruche sono formazioni innocue della pelle causate dal papilloma virus dell'uomo (HPV). Esistono diversi tipi di verruche, ma le più diffuse sono le verruche comuni e le verruche plantari. Si tratta di formazioni benigne costituite da un nucleo di tessuto interno alimentato da vasi sanguigni e rivestito da vari strati di tessuto epiteliale.

Le verruche comuni si riconoscono per la loro tipica superficie ruvida spesso crespa, di aspetto antiestetico. Normalmente compaiono sulle mani, sulle ginocchia e sui gomiti.

Le verruche plantari sono identiche alle verruche comuni, ma compaiono solo sulla pianta del piede o sulla punta delle dita, sono in genere più piatte e dolorose a causa della pressione esercitata sul piede durante la deambulazione.

Le verruche colpiscono una percentuale compresa tra il 7% ed il 10% della popolazione generale, con particolare frequenza tra i bambini e gli adolescenti. Le verruche sono estremamente contagiose e possono comparire più frequentemente in presenza di un sistema immunitario indebolito. Le verruche si trasmettono da un soggetto all'altro o, in una stessa persona, da un punto all'altro del corpo mediante contatto diretto con l'area infetta. Oltre il 50% delle verruche scompare nel giro di due anni anche in assenza di un trattamento. Tuttavia chi ne soffre decide spesso di curarle invece di aspettare che scompaiano in quanto possono essere sgradevoli alla vista e, nel caso delle verruche plantari, anche dolorose. Ci sono due modi per trattare le verruche comuni e plantari: in primo luogo preparazioni a base di acidi che vengono applicate direttamente sulla verruca; oppure la rimozione chirurgica effettuata dai medici che può avvenire tramite terapia laser, attraverso la bruciatura oppure tramite la crioterapia (congelamento con azoto liquido). La Penna per Verruche Wartner® rappresenta un nuovo trattamento "fai da te" semplice ed efficace contenente un gel ad alta concentrazione che permette di rimuovere la verruca comune o plantare fin dalla prima settimana.

B. Che cosa è Wartner® Penna per Verruche e a cosa serve?

La Penna per Verruche Wartner® è un dispositivo medico indicato per il trattamento delle verruche comuni e plantari (verruca vulgaris e verruca plantaris). L'applicatore a penna contiene un nuovo gel ad alta concentrazione per la rimozione delle verruche basato sul tradizionale metodo di rimozione con acido. Il gel TCA (acido Tricloroacetico) favorisce l'eliminazione delle verruche (comuni e plantari) grazie ad un'azione di eradicazione chimica e topica, provoca un'essfoliazione del tessuto cheratosico delle verruche e permette la soppressione del virus scatenante la verruca. Dopo la desquamazione della verruca (comune o plantare), la pelle si rigenera.

C. Quando NON usare la Penna per Verruche Wartner®?

- NON usare su zone diverse da mani e piedi
- NON usare su zone sensibili, viso o genitali
- NON usare in combinazione con altri trattamenti per verruche
- NON usare su appendici cutanee, nei, macchie scure della pelle o per l'essfoliazione della pelle, lentiggini, verruche d'acqua (mollusco contagioso), cheratosi seborroica (verruca seborroica)
- NON usare su bambini al di sotto dei 4 anni.
- In caso di gravidanza, allattamento, se si soffre di altre malattie della pelle, se si è diabetici o se non si ha l'assoluta certezza che si tratti effettivamente di una verruca, consultare il medico o il farmacista prima dell'uso.

D. Istruzioni per l'uso

La prima volta che si utilizza la Penna per Verruche Wartner®, è necessario girare la parte superiore della penna in senso orario per caricare il gel nella punta trasparente. Potrebbero essere necessari numerosi giri affinché la prima goccia sia visibile. Durante le applicazioni successive, girare lentamente la parte superiore della penna fino a quando la goccia non è visibile, applicare delicatamente il gel sulla parte superiore della verruca. Se, accidentalmente, viene rilasciata una goccia di gel troppo grande e/o la pelle sana circostante la verruca viene a contatto con un eccesso di gel, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone, dopodiché sarà possibile riapplicare il giusto quantitativo di gel sulla verruca.

E. Risultati attesi

Prima del trattamento



La verruca è costituita da un nucleo di tessuto interno caratterizzato da vasi sanguigni, coperto da strati di tessuto cutaneo esterno.

Durante il trattamento



La pelle sulla parte superiore della verruca si esfolia. La pelle ispessita può apparire di colore scuro/marrone a causa del sangue coagulato sotto la verruca. La pelle continuerà ad essfoliarsi. Questa è la naturale conseguenza dell'azione del gel TCA e segno di un positivo processo di rimozione della verruca. Questa fase può durare anche diverse settimane.

Dopo il trattamento



La verruca scomparirà e i vecchi strati di pelle gradualmente saranno rimpiazzati da nuovi strati di pelle sana. Possono trascorrere diverse settimane prima che la pelle appaia completamente guarita.

F. Precauzioni

- L'Acido Tricloroacetico (TCA) è un acido molto corrosivo. Applicare il gel solo sulla verruca e non toccare la pelle sana circostante. Se applicato sulla pelle sana, può risultare leggermente corrosivo per cui è necessario applicare il TCA gel con ESTREMA CAUTELA, specialmente nel caso della pelle dei bambini che è molto delicata.
- Al fine di prevenire il contatto con la pelle sana, la zona circostante la verruca può essere protetta con un unguento di base grassa.
- Solo per uso esterno.
- Se, accidentalmente, viene rilasciata una goccia di gel troppo grande e/o la pelle sana circostante la verruca viene a contatto con un eccesso di gel, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone, dopodiché sarà possibile riapplicare il giusto quantitativo di gel sulla verruca.
- Non usare il gel della penna per verruche Wartner® sui vostri vestiti, gioielli, tessuti e mobili, in quanto potrebbe danneggiarli.
- In caso di irritazione, rossore o dolore, pulire l'area trattata con abbondante acqua e sapone e consultare il medico o il farmacista.
- Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso può causare irritazioni della pelle, dolore e bruciore.
- Se dopo una o più applicazioni notate arrossamento o irritazione, interrompere il trattamento.
- L'uso di una quantità eccessiva di gel può causare irritazione.
- Non usare su cute irritata o nelle zone che presentano infezione, arrossamento o altri segni di infiammazione, come prurito o gonfiore.
- Usare con estrema cautela quando si applica su pelle sottile o secca.
- È necessaria la supervisione dei genitori quando il prodotto deve essere applicato per curare le verruche dei bambini.
- Se, dopo 4 trattamenti la verruca non scompare, rivolgetevi al medico.
- Se non si ha l'assoluta certezza che si tratti effettivamente di una verruca, consultare il medico.
- Non si conosce alcuna interazione con altri farmaci. Nessuna controindicazione è nota con l'utilizzo della Penna per Verruche Wartner®.
- Per preservare l'igiene personale, il prodotto è indicato per l'utilizzo da parte di un'unica persona. La stessa penna non deve essere utilizzata da più persone e può essere buttata prima della data di scadenza, nel caso in cui essa sia stata utilizzata per il trattamento di verruche multiple (dopo la fine del trattamento).
- **G. Effetti Collaterali**
- È importante utilizzare il prodotto seguendo correttamente le istruzioni, in quanto un eccesso di esposizione potrebbe causare una sensazione di bruciore, dolore, lieve ulcerazione o depigmentazione della pelle circostante la zona da trattare.
- La pelle può diventare scura temporaneamente dopo l'applicazione.
- Per evitare una iperpigmentazione o una depigmentazione della pelle, la zona trattata dovrebbe essere protetta dai raggi UV e dall'esposizione al sole.

H. Modalità di conservazione

Conservare in un luogo sicuro, asciutto e buio a temperatura ambiente (15-25°C). Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Richiudere saldamente la penna dopo l'uso. Una volta terminato il trattamento, pulire accuratamente la punta della penna con un panno prima di riporla.

Ingredienti

Acido Tricloroacetico

medical brands
Veembroederhof 96, 1019 HC Amsterdam, NL
Distributore Italia:
Chefaro Pharma Italia S.r.l.
Viale Castello della Magliana 18, 00148 Roma



L'ultima revisione di questo foglietto illustrativo è avvenuta a Gennaio 2012.

FACILE DA USARE, APPLICAZIONE IN 4 FASI

FASE 1.

Tenere la penna in verticale con la punta trasparente verso il basso. Lentamente girare la parte superiore della penna in senso orario.



FASE 2.

Assicurarsi che il gel defluisca nella punta trasparente.



FASE 3.

Applicare attentamente la goccia di gel solo sulla parte superiore della verruca (non sulla cute sana circostante). Assicurarsi che la superficie della verruca sia completamente ricoperta da un sottile strato di gel. A seconda delle dimensioni della verruca potrebbero essere necessarie una o più gocce di gel.



FASE 4.

Lasciare asciugare il gel per circa 10-15 minuti prima di indossare abiti o calzature. Ripetere il trattamento 2 volte al giorno per 4 giorni. Dopo il trattamento di 4 giorni, la pelle continuerà ad essfoliarsi per i successivi 4 giorni. È possibile rimuovere delicatamente la pelle desquamata sotto l'acqua tiepida. Dopo il trattamento si formerà un nuovo strato di epidermide sana (senza verruche). Se la verruca non scompare completamente, ripetere il trattamento dopo una pausa di 4 giorni. È possibile ripetere il trattamento fino a 4 volte.



La verruca può scomparire a partire dalla prima settimana di trattamento. Dopo pochi giorni di trattamento, la superficie della verruca potrebbe scurirsi. Questo è un episodio normale nel processo di guarigione. Può capitare che trascorrono diverse settimane prima che la pelle guarisca completamente.

Se la verruca è di piccole dimensioni (ad esempio come la punta di un ago), applicare il gel esclusivamente sulla superficie della verruca una volta al giorno.

In caso di verruca plantare ricoperta da un callo, prima di utilizzare la Penna per Verruche Wartner®, è consigliabile immergere il piede in acqua calda e poi strofinare attentamente il callo con una lima. Potrebbero verificarsi alcuni disagi in caso di pressione o frizione sulla zona trattata. Può essere utile applicare un cerotto per proteggere l'area sensibile.

IMPORTANTE

- Se la verruca è di piccole dimensioni (ad esempio come la punta di un ago), applicare solo una piccola goccia di gel una volta al giorno.
- Il gel contenuto nella Penna per Verruche Wartner® è molto concentrato. Per ogni applicazione usare esclusivamente la quantità di gel necessaria a coprire la superficie della verruca.
- Una volta terminato il trattamento, pulire accuratamente la punta della penna con un panno prima di riporla.
- EVITARE il contatto con la pelle sana circostante la verruca.
- Indicato solo per verruche delle mani e dei piedi.
- Per prevenire eventuali lesioni si consiglia di mantenere una corretta igiene della parte trattata.