

# WARTNER®

## penna per calli (4ml e)

### Per la rimozione dei calli e duroni

⚠ **LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER EVITARE UN USO SCORRETTO DELLA PENNA PER CALLI WARTNER®**

#### A. Cosa è Wartner® penna per calli e a che cosa serve?

Wartner® penna per calli è un dispositivo medico indicato per il trattamento della pelle ispessita o delle lesioni cutanee come calli e duroni difficili o persistenti, causati dalla costante pressione sulla pelle (ad esempio, da calzature troppo strette). Il costante attrito induce una iper-proliferazione dei cheratinociti che si trasformano in lesioni ispessite e dolorose.

L'applicatore a penna contiene un gel ad alta concentrazione per la rimozione dei calli e duroni. Il gel a base di TCA favorisce un'esfoliazione della pelle. Nel frattempo la pelle ispessita sparisce e si formerà un nuovo strato di epidermide sana.

#### B. Che cosa dovresti sapere prima di utilizzare Wartner® penna per calli?

Non si conosce alcuna interazione con altri farmaci. Nessuna controindicazione è nota con l'utilizzo di Wartner® penna per calli. Non usare contemporaneamente altri prodotti per il tratta-

mento dei calli. In gravidanza o durante il periodo di allattamento, consultare il proprio medico o il farmacista prima di utilizzare Wartner® penna per calli. Non usare nei bambini al di sotto dei 4 anni. Consultare il medico in casi di diabete.

#### C. Modalità d'uso

La prima volta che si utilizza la Penna per Calli Wartner®, è necessario girare la parte superiore della penna in senso orario per caricare il gel nella punta trasparente. Potrebbero essere necessari numerosi giri affinché la prima goccia sia visibile. Durante le applicazioni successive, girare lentamente la parte superiore della penna fino a quando la goccia non è visibile, applicare delicatamente il gel sull'area da trattare. Se, accidentalmente, viene rilasciata una goccia di gel troppo grande e/o la pelle sana circostante il callo viene a contatto con un eccesso di gel, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone, dopodiché sarà possibile riapplicare il giusto quantitativo di gel.

#### D. Precauzioni

• L'Acido Tricloroacetico (TCA) è un acido molto corrosivo. Applicare il gel solo sull'area da trattare e non tocca-

re la pelle sana circostante. Se applicato sulla pelle sana, può risultare leggermente corrosivo per cui è necessario applicare il TCA gel con ESTREMA CAUTELA.

- Solo per uso esterno.
- Non applicare sulla pelle sana. Nel caso in cui il gel entri a contatto con la pelle sana, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
- Non usare il gel della penna per Calli Wartner® sui vostri vestiti, gioielli, tessuti e mobili, in quanto potrebbe danneggiarli.
- In caso di irritazione, rossore o dolore, pulire l'area trattata con abbondante acqua e sapone e consultare il medico o il farmacista.
- Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso può causare irritazioni della pelle, dolore e bruciore.
- Non usare su cute irritata o nelle zone che presentano infezione, arrossamento o altri segni di infiammazione, come prurito o gonfiore.
- L'uso di una quantità eccessiva di gel può causare irritazione.
- Se, dopo un ciclo di 4 trattamenti il callo non scompare, rivolgetevi al medico.
- Se non si ha l'assoluta certezza che si tratti effettivamente di un callo o durone, consultare il medico.

#### E. Informazioni importanti

• È importante utilizzare il prodotto seguendo correttamente le istruzioni, in quanto un eccesso di esposizione potrebbe causare una temporanea

sensazione di bruciore, dolore, lieve ulcerazione e temporanea depigmentazione della pelle circostante la zona trattata.

- La pelle può diventare bianca temporaneamente dopo l'applicazione.
- La zona trattata dovrebbe essere protetta dai raggi UV e dall'esposizione al sole.

#### F. Modalità di conservazione

Conservare in un luogo sicuro, asciutto e buio a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Richiudere saldamente la penna dopo l'uso.

Una volta terminato il trattamento, pulire accuratamente la punta della penna con un panno prima di riporla.

**Ingredienti**  
Acido Tricloroacetico

medical brands  
Veembroedhof 96, 1019 HC Amsterdam, NL  
Distributore Italia:  
Chefaro Pharma Italia S.r.l.  
Viale Castello della Magliana 18, 00148 Roma

Per maggiori informazioni: [www.wartner.com](http://www.wartner.com)



L'ultima revisione di questo foglietto illustrativo è avvenuta a Febbraio 2012.

### FACILE DA USARE, APPLICAZIONE IN 4 FASI

#### Prima del trattamento



In primo luogo, immergere il piede in acqua calda per 5 minuti e poi strofinare attentamente il callo con una lima. Asciugare bene: non applicare il gel finché la parte da trattare non sia completamente asciutta. Non utilizzare il gel su ferite aperte. Lima non inclusa.



#### FASE 1

Tenere la penna in verticale con la punta del pennello verso il basso e ruotare la parte superiore della penna per far uscire il gel.



#### FASE 2

Lasciare che il gel defluisca sulla punta della penna per 3-5 secondi.



#### FASE 3

Applicare attentamente la goccia di gel solo sul callo o durone (non sulla cute sana circostante). A seconda delle dimensioni dell'area da trattare potrebbero essere necessarie una o più gocce di gel.



#### FASE 4

Lasciare asciugare il gel per circa 10-15 minuti prima di indossare indumenti o calzature. Ripetere il trattamento 1 volta al giorno per 4 giorni.

Dopo il trattamento di 4 giorni, la pelle continuerà ad esfoliarsi per i successivi 4 giorni. È possibile rimuovere delicatamente la pelle desquamata sotto l'acqua tiepida. Dopo il trattamento si formerà un nuovo strato di epidermide sana (senza callo o durone). Il callo o il durone scomparirà a partire dalla prima settimana di trattamento. Se il callo o il durone non scompare completamente, ripetere il trattamento dopo una pausa di 4 giorni. È possibile ripetere il trattamento fino a 4 volte.

Una volta terminato il trattamento, pulire accuratamente la punta della penna con un panno prima di riporla.

CE 0086

1860A